

Hören - Sehen - Schreiben

Version 6.3 für Windows XP bis inkl. Windows 10

Einsatzbereiche: Aphasietherapie / Logopädie / Grund- u. Förderschule / Integration / Inklusion / Rehabilitation

Für Kinder und Erwachsene mit Schwächen im auditiven und im visuellen Bereich.

Funktionen: Hören, Lesen, Schreiben, Zuordnen, Erinnern; mit Bildern, Sprache und Geräuschen.

Besonders gut geeignet für die **Aphasietherapie bei Wortfindungsproblemen**, sowie zur Alphabetisierung, Integration, Inklusion.

Empfohlen zur Grundausstattung in logopädischen Praxen sowie an Grund- und Förderschulen.

Patienten können selbständig mit dem Programm arbeiten.

Alle Texte können vom Programm lautiert und buchstabiert werden, auch während der Texteingabe.

Die Übungen umfassen Anlautlisten / Doppelungen / Dehnungen / Konsonantenhäufungen / Lautdifferenzierung / Lautposition / ähnliche Laute / semantische Wortfelder.

Eigene Übungen lassen sich mit dem integrierten Editor einfach und schnell erstellen.

Programm 1: Hören und Schreiben

Flexible Einstellungen ermöglichen eine vielfältige unterschiedliche Nutzung:

Aktion: Nur hören

Sprache und Geräusche werden ausgeschaltet. Das Bild ist zu benennen.

Über den Abspielknopf kann das Wort zur Bestätigung jederzeit gehört werden.

Aktion: Schreiben

Zum Bild soll das dazu gehörende Wort eingegeben werden.

Der Anwender kann das Wort bei Bedarf immer wieder anhören.

Aktion: Schreiben mit Vorgabe

Je nach Einstellung wird z.B. der 1. Buchstabe bereits angezeigt

oder das Wort ist sichtbar, allerdings fehlt der 1. Buchstaben.

Fehlende Wortteile sind einzugeben.

Aktion: Lautieren / buchstabieren

Wörter werden ohne Bild lautiert/buchstabiert. Das Wort soll erkannt werden.

Aktion: Diktat

Das Bild ist nicht sichtbar. Das gehörte Wort soll geschrieben werden.



Programm 2: Welches Wort stimmt?

Aktion: Lesen

Zu einem Bild werden je nach Einstellung von 2 bis zu 6 Texte angezeigt.
Die Texte müssen gelesen werden, der zum Bild passende Text ist anzuklicken.
Die Wörter können Nomen, Verben oder Adjektive sein.
Eigene Wortlisten können mit dem Editor leicht erstellt werden.

Aktion: Bild-Aufdeckmodus

Bei dieser Variante ist das Bild hinter einer einstellbaren Anzahl undurchsichtiger Felder versteckt. Die Felder werden mit der Maus angeklickt und zeigen dann den dahinter liegenden Bildausschnitt.
Aufgabe ist es, mit möglichst wenigen geöffneten Feldern das Wort dem Bild zuzuordnen zu können.



Programm 3: Bild zum Wort

Wörter lesen,
Wörter zuordnen,
zu einem gelesenen Wort das jeweils passende Bild wählen.



Programm 4: Bild zum Ton

Aufgabe: Hören und zuordnen),

Zu einem gesprochenen Wort oder einem Geräusch muss das passende Bild gefunden werden.



Weitere Programme:

5. **Bild-Memory** = visuelles Gedächtnistraining

6. **Sound-Memory** = auditives Gedächtnistraining

Das auditive Training in dieser spielerischen Form erleichtert das Einprägen des Wortklangbildes und das Behalten des Wortsinns, ohne das man ein Gefühl der Anstrengung beim Lernen erlebt.

7. Editor

Der Editor ermöglicht das Zusammenstellen von Bildern und Sounds zu neuen Dateien. Selbstverständlich können auch eigene Digitalfotos verwendet werden.

Durch klicken auf das ausgewählte Bild wird automatisch Bild, Sprache und falls vorhanden Geräusch, in eine Datei eingefügt.

Sind alle Bilder eingefügt, wird die neue Datei gespeichert und kann im Programm genutzt werden. Einfacher geht es wirklich nicht.

HSS - neue Liste

Datei Bearbeiten Alle zur Verfügung stehenden Begriffe anzeigen Hilfe

Neue Zeile anhängen Bild 100 % Leinwandfarbe

Nr.	Text editieren	Bild einfügen: Doppelklick in diese Spalte	Geräusche einfügen: Doppelklick in diese Spalte
1	der Kopf		
2	die Nase		
3	die Zähne		
4	die Hand		

Bilder zum Einfügen

Fotos Cliparts farbig Cliparts sw insgesamt 4847 E

Vorschau:

Haken der.jpg Hand die.jpg H.
Haken der.WMF Hand die.WMF H.
Haken der.wmf Hände abtrocknen.jpg H.
halb.jpg Hände die.wmf H.
Halle die.jpg Hände waschen.jpg H.
Halle die.WMF Handschellen die.wmf H.
Halle die.wmf Handschuh der.jpg he
Halm der.wmf Handschuh der.WMF H.
Hals der.jpg Handschuhe die.jpg H.
Hals der.WMF Handstand der.jpg H.
Halskette die.jpg Handtasche die.jpg H.
Halskette die.wmf Handtuch das.jpg H.
halten.wmf Handtuch das.WMF H.
Haltestelle die.jpg Handy das.jpg H.
Haltestelle die.wmf Handy das.WMF H.
Hamburger der.wmf Hängebauschwein das.jpg H.
Hamburger der.wmf Hängebrücke die.jpg H.
Hammer der.jpg hängen.jpg he
Hammer der.WMF hängen.WMF he
Hammer der.wmf Hantel die.jpg he
hämmern.jpg Hantel die.WMF H.
hämmern.WMF Hantel die.wmf H.
hämmern.wmf Häppchen die.wmf H.
Hampelmann der.WMF Harke die.WMF H.
Hamster der.WMF Harke die.wmf H.
Hamster der.wmf harken.jpg H.

Abbrechen OK - Bild übernehmen

Einfügen durch Doppelklick C:\ETverlag\Hss32\Bilder\Fotos\H\Hand